

PeriAcryl®90HV Alta Viscosidad



¡Asegúrese de que su cirugía gane el premio al mejor vestido!

PeriAcryl®90 es una mezcla especial de adhesivos de cianoacrilatos de n-butil y 2-octil que están especialmente diseñados para funcionar en la cavidad bucal. Esta formulación crea un apósito fuerte pero flexible que ayuda en el cierre quirúrgico y protege y estabiliza el sitio quirúrgico. PeriAcryl®90 HV Alta Viscosidad es una formulación más gruesa que permite una aplicación precisa gracias a un control de flujo mejorado.

Beneficios de PeriAcryl®90

PeriAcryl®90 crea una zona de inhibición contra las bacterias que pueden causar infecciones.

El uso de PeriAcryl®90 ayuda a detener el sangrado y sella las heridas para reducir el tiempo quirúrgico dedicado a lograr la hemostasia o colocar suturas.

PeriAcryl®90 es un apósito resistente y cómodo en comparación con la gaza que puede sentirse voluminosa y caerse demasiado pronto.

Características de PeriAcryl®90

- Rápida polimerización al entrar en contacto con agua o tejido bucal húmedo.
- Fijación hasta 14 días cuando se realiza una aplicación multicapa.
- Color violeta para mayor visibilidad durante la aplicación.
- Biocompatible y atóxico.

Cómo usar PeriAcryl®90



Paso 1

Asegúrese de que el sitio de tratamiento esté limpio, seco y que no haya una hemorragia activa. Aplique una capa fina de PeriAcryl®90 sobre el sitio.



Paso 2

Espere aproximadamente 10 segundos para que comience a formarse la unión adhesiva. Con una gasa de algodón empapada, aplique agua directamente sobre la aplicación de PeriAcryl®90.



Paso 3

Repita los pasos uno y dos hasta que se forme una capa visible sobre el sitio de tratamiento. Se recomienda aplicar dos o tres capas.

Una serie de casos con PeriAcryl®90



Fotos cortesía de Ramon Gómez Meda, DDS

Más usos de PeriAcryl®90

Vendaje y cierre de sitios donantes

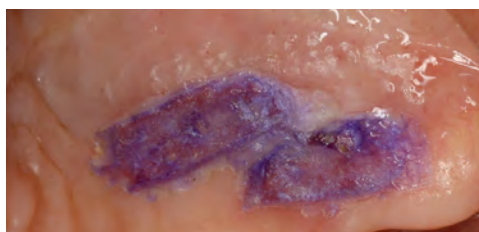


Foto cortesía de Michael Wilby, DDS



Foto cortesía de Farzin Gannad, DDS

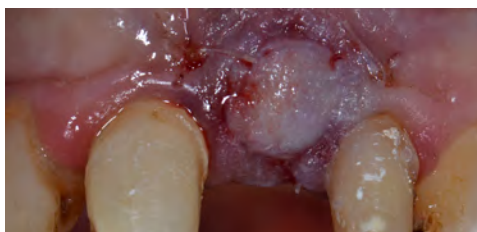


Foto cortesía de Colin B. Weibe, DDS

Recubrimiento de injerto subepitelial y gingival libre



Foto cortesía de Javier Rojas, DDS



Estabilización de la membrana post-extracción



Foto cortesía de Kenji Hosoya Suzuri, DDS



1-877-940-2262



www.periacryl.com



1-877-450-4000



info@glustitch.com



+1-604-788-5785



PeriAcryl